



ProFront™

Skyddsvisir med huvudbygel

Bruksanvisning



BRUKSANVISNING I ORIGINAL

Version 8

Andreas Wilhelmsson

Pamex Plastic AB

2021-03-15

Innehåll

ALLMÄNT	2
Syfte	2
Grundläggande krav	2
TILLVERKARENS UPPGIFTER.....	2
PRODUKTBESKRIVNING	3
Märkning.....	3
Avsedd användning.....	3
Produktgaranti.....	3
Produktbegränsningar.....	3
ANVÄNDNINGSBESKRIVNING.....	5
Monteringsanvisning.....	5
Skötsel och underhållsanvisning	7
Transportemballage	8
Förvaring.....	8
RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR.....	9
ÅTERVINNING.....	9
ÖVRIGT	9

Allmänt



Denna produkt får endast brukas enligt de angivelser som framgår i denna bruksanvisning.

Syfte

Syftet med denna bruksanvisning är att man ska få förståelse om hur denna utrustning ska användas samt bli varskodd om de eventuella risker som finns.

Grundläggande krav

För att man ska få nyttja och använda denna utrustning måste man ha läst och förstått denna bruksanvisning.

Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig för alla användare av produkten.

Tillverkarens uppgifter

Tillverkare: Pamex Plastic AB
Besöksadress: Tallberga 4,
333 73 Bredaryd,
Sverige
@email: info@pamex.se
Telefon: 0371-701 85



Produktbeskrivning

Produktnamn: ProFront™

Produktbeskrivning: Skyddsvisir

Artikelnummer: 200404

Produkten är CE märkt mot PPE förordningen (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment och uppfyller samtliga krav i metoden/standarden:

SS EN 166:2001

Produkten är testad och certifierad av:

RISE Research Institutes of Sweden AB

Box 857

501 15 BORÅS

Sverige

Anmält organ nummer 0402

EG försäkran för denna produkt kan hittas på www.pamex.se/doc

Märkning

På ramen: **Pamex plastic AB EN 166 3 S** där EN 166 är den standard som produkten testats mot, 3 innebär skydd mot vätska (droppar och stänk) och S är utökad robusthet.

På visiret: **Pamex.se 1 S** är 1 betyder optisk klass 1 och S utökad robusthet.

Avsedd användning

Produkten är avsedd att användas som skydd mot droppsmitta.

Produktgaranti

Produkten har 1 års garanti efter uppackning och montering har skett.

Lagringstid är 15 månader som mest och bör inte användas efter denna tid från tillverkningsdatum.

Produktbegränsningar



OBS!!

Lämna ej visiret i direkt solljus då det påverkas av längre tids UV-strålning.



VARNING!!

Skadad eller repat visir måste bytas ut.



VARNING!!

Material som kommer i kontakt med bäraren hud kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer.


Användningsbeskrivning

Monteringsanvisning

Så här monterar man ihop och använder man ProFront™ skyddsvisir:


Steg 1:

Ta ur huvudbygeln och visiret ur förpackningen (se bild till höger).

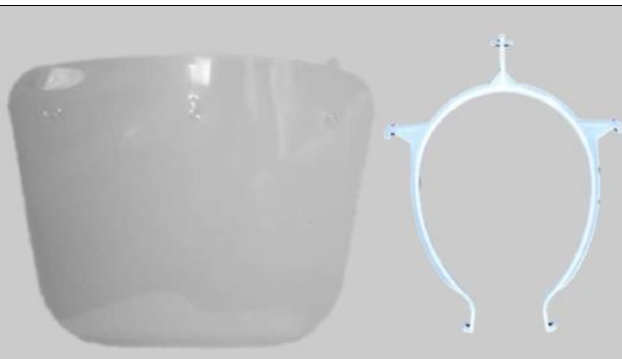


Steg 2:

Fäst sedan visirets mittenhål mot huvudbygelns mittersta stödfäste (se bild till höger).

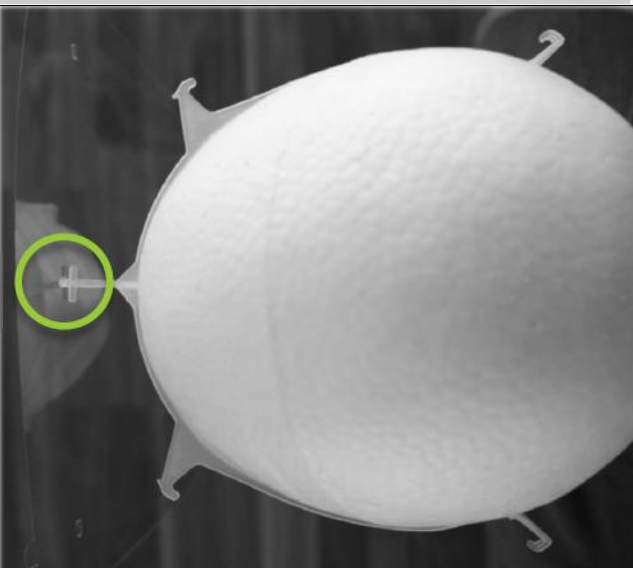


Steg 3:

Böj slutligen visiret och fäst de båda yttre hålen mot sitt stödfäste på huvudbygel (se bild till höger).

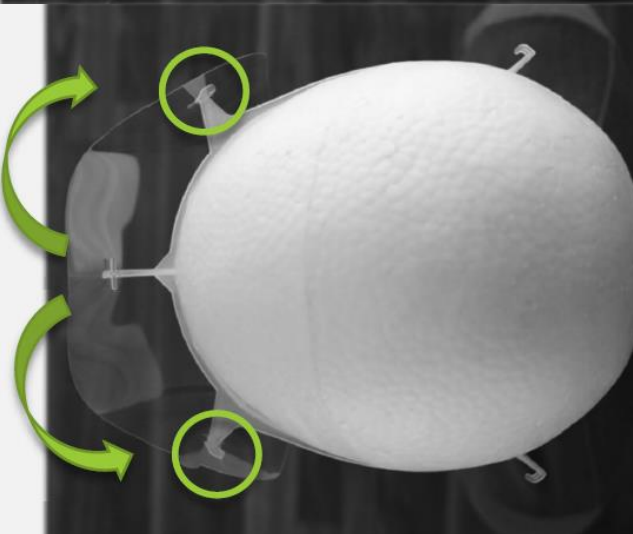

Steg 4:

Slutligen sätt ProFront™ skyddsvisir på huvudet. Bygeln ska sitta precis ovanför ögonbrynen. Man reglerar vinkeln på visiret genom att flytta bakre delen av huvudbygeln upp eller ner för bästa passning. (se bild till höger).

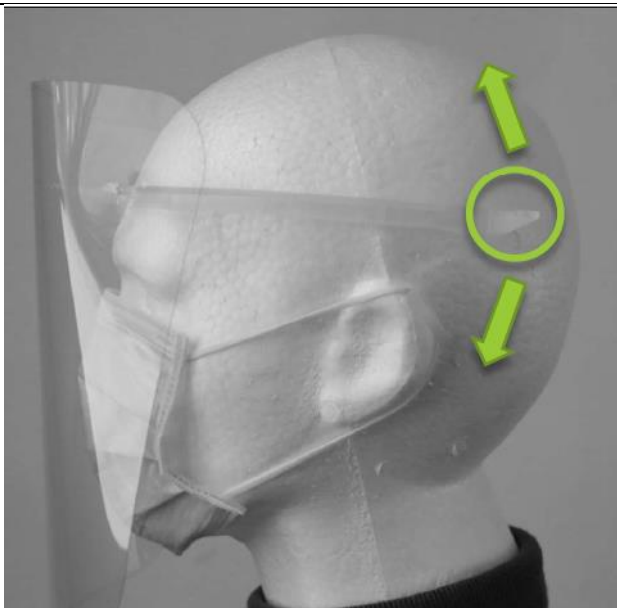

OBS!! Kontrollera alltid att




ProFront™ skyddsvisir sitter korrekt innan arbete får påbörjas.

Steg 5:

För att ta av visiret utan att riskera att få smitta på händerna.

Ta tag i de bakre krokarna, dra försiktigt utåt och ta av visiret rakt framåt. (se bild till höger).

Därefter följ de sedvanliga renlighetsrutinerna som att tvätta och/eller desinficera händerna noggrant efteråt.

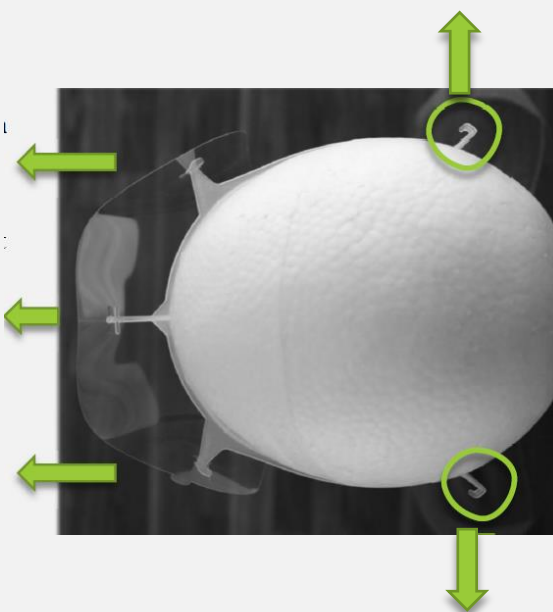

Skötsel och underhållsanvisning




OBS!!


ProFront™ skyddsvisir är inte avsedd för långtidsanvändning men den går att återanvändas så länge visiret har fullgod sikt och är fri från åverkan eller skada.

Man sköter och återanvänder ProFront™ skyddsvisir på följande sätt:


1. Desinfektera händerna med handsprit.

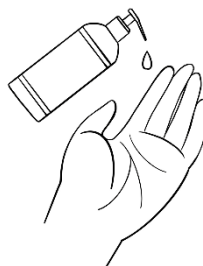


2. Tag på skyddshandskar.

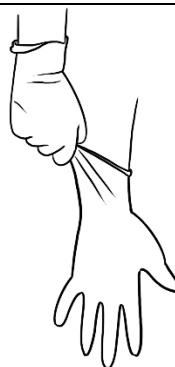

3. Desinfektera visir och huvudbygel med desinfektionsmedel innehållande tensid.

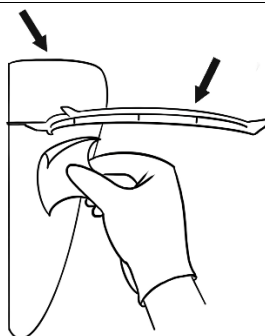

4. Häng upp eller placera visiret så att det kan torka, alternativt torka av med en klinisk ren engångs trasa.

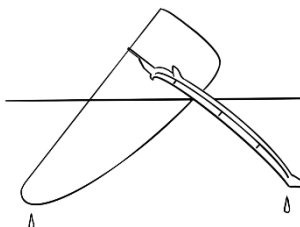


5. Förvara den torra och desinfekterade visiret i en ren plastpåse tills den ska återanvändas igen.



6. Tag av skyddshandskarna.



7. Slutligen avsluta med att desinfektera händerna med handsprit.

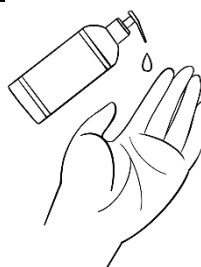

Transportemballage

ProFront Visir levereras förpackade i kartong. Bilden till höger visar ett exempel på hur denna förpackning kan se ut. I varje kartong medföljer en bruksanvisning. Denna måste finnas tillgänglig för samtliga



Förvaring

- Förvara visiren bör så att risk för yttre åverkan undviks
- Undvik förvaring av visiren i direkt solljus.

Reservdelar och tillbehör

Bygel: 2-200404-XX

Visir: 1-200404

Återvinning

När väl visiret är förbrukad demonteras den i omvänd ordning enligt tidigare monteringsbeskrivning.

Visiret samt huvudbygel källsorteras enligt de gällande lokala återvinningsregler som hårdplastavfall.

Övrigt

Pamex vill passa på att få tacka för att just ni har valt att köpa vår produkt och vi är stolta över att vi kan bidra till en säkrare värld.